


## Recollida de mostra oral amb hisop

És **MOLT IMPORTANT** que abans de realitzar la recollida de mostra no begui, ni mengi, ni fumi almenys durant una hora abans de la realització de la prova.

### Material necessari per a la recollida de les mostres.

- 2 hisops amb l'extrem de cotó per participant.
- 1 sobre de paper per participant per a guardar els hisops, i un sobre més gran per a preparar el paquet amb totes les mostres en sobres de paper per al seu enviament al laboratori.
- 1 formulari de sol·licitud.

Els hisops que haurà de comprar han de ser de cotó, i estar totalment estèrils. Pot comprar els hisops en una farmàcia o en el nostre centre **ADN Institut**.

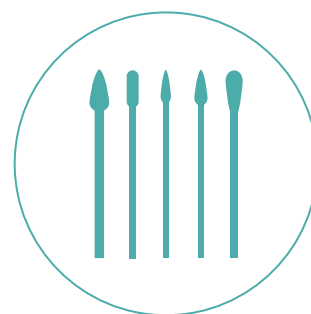

**IMPORTANT:** No servirà la utilització de bastonets bilaterals.

Ha de disposar de tants sobres de paper com participants hi hagi en la prova. En cada sobre haurà d'escriure un nom i un identificador (per exemple, el sobre destinat a recollir les mostres del suposat pare tindrà escrit "Pare (nom del pare)").

### Procediment de recollida de la mostra.

La mostra a recollir es realitzarà amb 2 hisops, 1 per cada galta.

#### PAS 1

Renti's les mans per a extreure les precaucions i evitar contaminar l'hisop. En obrir el sobre o embolcall que continguin els hisops s'ha d'extreure les precaucions, ja que s'ha d'evitar que el cotó entri en contacte amb superfícies o objectes.



#### PASO 2

Amb el primer hisop reculli mostra de la galta dreta: freg fermament (però no de manera agressiva) la galta 30 vegades o durant 1 minut.


Repeteixi aquest procediment amb l'altre hisop en la galta esquerra. Eviti tocar el cotó amb la geniva o les dents per a no contaminar la mostra.



**PASO 3**

Abans de posar els hisops en el sobre corresponent, deixi assecat el cotó durant una hora. MAI toqui el cotó.

Ha de deixar-los assecat recolzats en algun lloc en el qual l'extrem del cotó quedi mirant cap amunt sense tocar res.

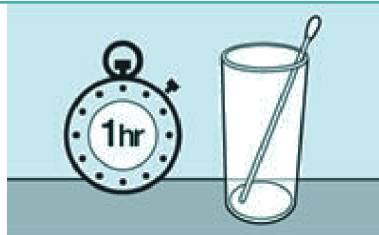**PASO 4**

Una vegada secs posi els hisops directament dins del sobre de paper, sense embolcall de plàstic i evitant que l'extrem de l'hisop (cotó) entre en contacte amb qualsevol superfície que no sigui el sobre de paper. NO toqui el cotó per a comprovar que estigui sec. Tancament el sobre, en el qual només ha d'haver-hi els hisops dins.

**PASO 5**

Omple i signa el formulari de sol·licitud.

Una vegada que el tingui emplenat, ha de posar el formulari signat juntament amb els sobres amb els hisops, dins d'un altre sobre més gran, i tancar-lo.

Després de realitzar el pas 5 ha de posar-se en contacte amb el nostre centre, i nosaltres ens encarregarem de concertar la recollida de la mostra amb el missatger.



**Quan tingui a punt les mostres i el formulari complert contacti'ns per una de les següents vies, especificant, horari, dia, i direcció de recollida:**

**Email:** [atencio@adninstitut.com](mailto:atencio@adninstitut.com)

**Telèfon:** 93 115 99 50

**WhatsApp:** 647920216